




Cura e Manutenzione

Il SecurAcath rende la procedura di medicazione più semplice e veloce poiché il catetere resta sempre fissato in posizione, mentre vengono eseguite le routinarie procedure di medicazione dell'exit site.

Punti importanti:

- Se è presente del sangue sul SecurAcath, utilizzare una garza imbevuta di fisiologica per sciogliere e rimuovere il sangue
- Sollevare delicatamente il catetere ed il SecurAcath per effettuare la pulizia dell'exit site a 360°
- Non torcere o girare il SecurAcath rispetto alla posizione iniziale
- Applicare la medicazione trasparente in modo morbido. Se la medicazione è troppo stretta, può causare fastidio, mentre il paziente si muove.
- Coprire con la medicazione trasparente anche l'hub del catetere (aletta o farfalla) oppure stabilizzarlo con Steri Strips per prevenire la trazione o l'ingincchiamento del catetere.
- Effettuare la medicazione secondo il protocollo ospedaliero standard
- Se il paziente lamenta dolore al sito di inserzione, provare a modificare la medicazione. Assicurarsi che il SecurAcath sia appoggiato piatto sulla cute e che non si sia spostato dalla posizione iniziale. Sostituire la medicazione trasparente; verificare che la medicazione non sia troppo stretta.

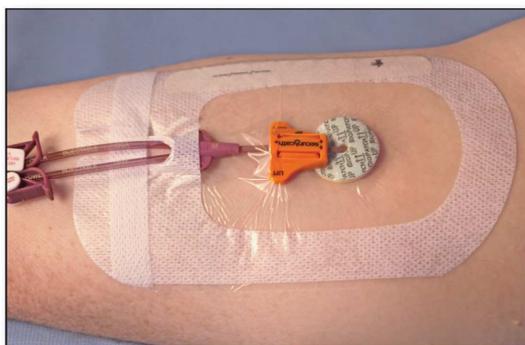

Coprire l'hub del catetere con la medicazione



L'hub può essere posizionato anche ad U.

Si prega di fare riferimento alle Istruzioni per l'Uso per indicazioni, controindicazioni, rischi, avvertenze, precauzioni e modalità di impiego

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:

contattare il Servizio Clienti al numero 02.48.424.1
o inviare una e-mail all'indirizzo sd@seda-spa.it
Ulteriori informazioni reperibili sul sito www.seda-spa.it



SEDA S.p.A.

**Scarica qui l'APP
Securacath!**






- Prendere la linguetta HOLD fra pollice e indice per stabilizzare il dispositivo
- Sollevare l'angolo della linguetta LIFT dalla base di ancoraggio



- Rimuovere completamente la copertura dalla base



- Rimuovere il catetere – non applicare una forza eccessiva
- Applicare pressione sul sito per l'emostasi
- Se il sito di inserzione presenta delle croste, bagnare il sito con una garza sterile imbevuta di fisiologica per alcuni minuti. Il tessuto si ammorbidirà e la rimozione sarà più facile

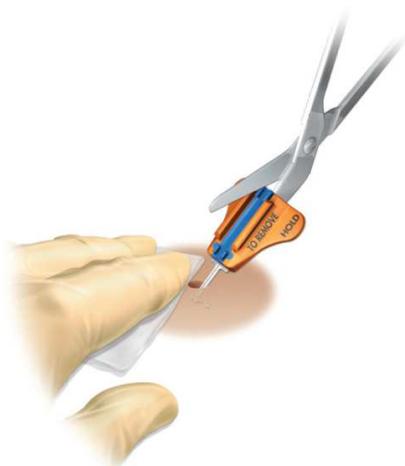

- Usare una forbice con le punte arrotondate (Mettzenbaum, Mayo o similare) per tagliare la base a metà, lungo la scanalatura blu



- Le ancore flessibili sono a forma di "L" con i piedini lunghi 5mm posti a lato del sito di inserzione
- Premere saldamente sul sito di inserzione con un dito appena sopra al piede dell'ancorina



- Rimuovere ogni metà della base con un movimento rapido e deciso.
- La pressione esercitata con le dita sul sito di inserzione mantiene fermi i tessuti, mentre i piedi dell'ancorina si raddrizzano durante la rimozione, senza causare lesioni o traumi ai tessuti.

Si prega di fare riferimento alle Istruzioni per l'Uso per indicazioni, controindicazioni, rischi, avvertenze, precauzioni e modalità di impiego.

0473
CE

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:

contattare il Servizio Clienti al numero 02.48.424.1
o inviare una e-mail all'indirizzo sd@seda-spa.it
Ulteriori informazioni reperibili sul sito www.seda-spa.it



SEDA S.p.A.

U.S. patent numbers 6,695,861, 7,931,658, 7,935,127, 7,753,889, 8,016,794, 8,016,813.
European Patents EP1539002, EP2002857. Additional Patents Pending. Interrad Medical and SecurAcath are trademarks of Interrad Medical, Inc. Biopatch® is a registered trademark of Johnson and Johnson Corporation. ©2015 by Interrad Medical, Inc. All rights reserved.
20150911 Rev. F

